

Uw nieuwe G-WEG® Uitpakken - Trainen - Inpakken

Hartelijk gefeliciteerd!

Voor u ligt uw nieuwe G-WEG®, een belangrijke bouwsteen voor het implementeren van valpreventietraining in uw instelling. Om ervoor te zorgen dat uw bewoners lang plezier hebben van uw aankoop, moeten de volgende belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in acht worden genomen. Bewaar ze zorgvuldig op.

Uitpakken


- De G-WEG® mag niet worden gewassen, maar vlekken moeten worden afgeveegd met lauw water.
- Zorg dat de ondergrond veilig en vlak is. Er mogen zich geen scherpe voorwerpen onder de G-WEG® bevinden. Ook een ondervloer van tapijt beperkt de optimale bruikbaarheid.
- Het wordt afgeraden om de therapeutische mat aan de ondergrond te bevestigen (lijmen, spijkeren, enz.) omdat dit kan leiden tot blijvende schade aan het product.

Trainen

- De G-WEG® mag alleen worden betreden met platte, gesloten schoenen.

Inpakken

- Niet buigen tijdens het transport en gebruik, alleen horizontaal opbergen!
- Verwijder de koker, deze hoeft niet steeds opnieuw te worden opgerold!
- Rol de G-WEG® op de volgende manier op: Vouw ongeveer 20 cm van een kant om en begin dan pas met oprollen (zie fotoserie).
- Omdat er zoveel verschillende desinfectiemiddelen zijn, test eerst een klein oppervlak op een onopvallende plaats.
- Laat het desinfectiemiddel verdampen voordat u de G-WEG® oprolt.

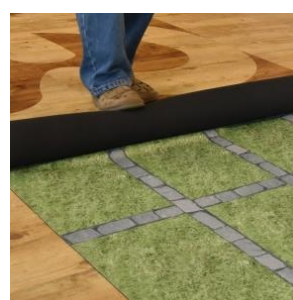

We wensen u veel plezier en trainingssucces met het G-WEG® systeem!

Bezoek ons op    